



**Arto® XP - Artikulatoren der neuen Generation >>>** Viel Zeit hat sich das Entwicklerteam von Baumann Dental bei der Realisierung der neuen Arto® XP-Artikulatorserie gelassen. Bereits im Jahr 2014 entstand die Idee, die bewährten und robusten Arto® Artikulatoren durch eine zeitgemäße und mehr auf Ergonomie ausgelegte Konstruktion zu ergänzen. Fute das Erscheinungsbild der klassischen Arto® Gerte noch auf dem ursprnglichen Design eines namhaften Wettbewerbers, so ging man bei der Arto® XP-Serie eigene Wege und schuf eine komplette Neukonstruktion. Das Entwicklungsziel war, eine stabile und ergonomische Plattform zu generieren, die gengend Raum zur Weiterentwicklung bietet, robust und przise in der Ausfhrung, die gleichzeitig aber auch nicht zu schwer ist. Auerdem wurde volle Kompatibilitt zu den bekannten Carbon-Artikulatoren gefordert. Aus Grnden der Stabilitt entschied man sich bei Baumann Dental allerdings fr eine solide Vollaluminium-Konstruktion. Zugute kamen den Entwicklern dabei die positiven Erfahrungen, die man bei der Weiterentwicklung der klassischen Arto® Gerte gemacht hatte. Der Rest ist Geschichte.

Baumann Dental prsentiert die neue Arto® XP-Non-Arcon-Artikulatorserie zur Markteinfhrung mit vier verschiedenen Modellen in unterschiedlichen Ausbaustufen: mit verstellbarem Bennett-Winkel, mit fester bzw. verstellbarer Kondylenbahnneigung und optional mit einem vllig neuartigen Immediate-Sideshift-Modul, das extrem platzsparend ausgefhrt wurde, um dem Anwender nicht unntig die Sicht zu versperren.

Das durchdachte und ansprechende Design der Arto® XP-Serie gestattet bei Schrgstellung des Artikulators einen sehr angenehmen Blickwinkel auf die montierten Modelle und ist auch bei der berkopf-Montage stabil. Eine Weltneuheit im Artikulatorbau stellt der serienmige Einsatz von Kondylenkugeln aus einem Hightech-Polymer dar, das hufig in der Luft- und Raumfahrttechnik Anwendung findet. Das selbstschmierende Material ist extrem verschleibarm und schont Achsen und Kondylenbahnen.

Arto® XP-Artikulatoren glnzen darber hinaus mit einem ppigen Ausstattungs- und Zubehrpaket, das kaum Wnsche offen lsst. So sind die Gerte bereits serienmig mit einem mikroverstellbaren Frontzahnfhrungsstift versehen – ein ntzliches Detail, das viel Geld spart. Um dem Anwender einen schnellen Start zu ermglichen, sind die Artikulatoren mit einer Schraubversion des Adesso Multisplit® Junior-Magnetplattensystems ausgestattet. Dieses System aus schlagzhem Kunststoff ist nicht zur Gleichschaltung geeignet, ermglicht aber die Nutzung verschiedener Montageplatten, von denen eine Auswahl mitgeliefert wird. Geeignete Magnetplattensysteme zur Gleichschaltung stehen selbstverstndlich im Nachkauf zur Verfgung. Neben dem vormontierten 0°-Frontzahnfhrungsteller gehrt auch eine gewinkelte 30°-Variante zum Lieferumfang. Ein praktischer und stabiler Transportkoffer, der die wertvollen Gerte auf dem Transportweg schtzt, rundet das Gesamtpaket schlielich ab.

Auf vielfachen Kundenwunsch wurde die Mglichkeit einer Individualisierung geschaffen: Das im Artikulatoroberteil eingelassene Typenschild lsst sich sehr leicht durch ein Schild mit individueller Laserbeschriftung austauschen. Den Laserservice bietet Baumann Dental kostengnstig an. Ein optisches Highlight sind die austauschbaren farbigen Seitenschalen. In Zukunft werden verschiedene Dekore zur Individualisierung nach Kundenwunsch angeboten.




## ARTO XP 2 ARTIKULATOR

Das Grundmodell der neuen XP-Serie und gleichzeitig das Arbeitstier, in klassischer Mittelwert-Funktionalität, ausgestattet mit demselben umfangreichen Zubehör wie seine Brüder.



Ein gewinkelter 30°-Frontzahnführungsteller befindet sich bei allen XP-Artikulatoren im Lieferumfang.

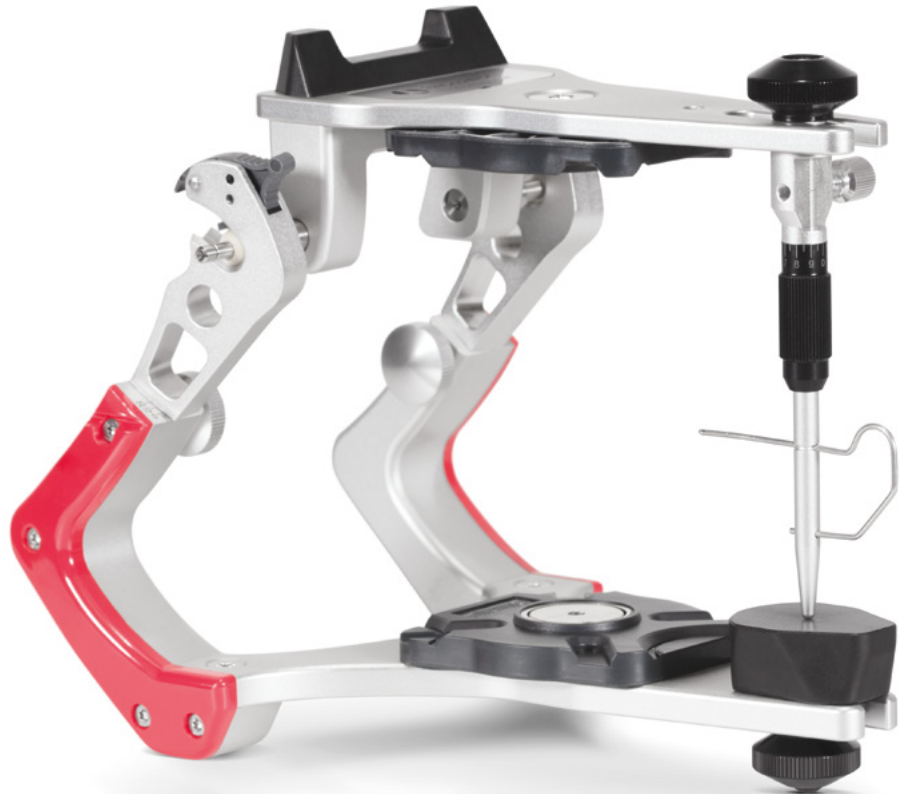

Arto XP 2 >>>	
Katalognummer	#12702
Bauweise	Non-Arcon
Artex*-kompatibel	•
Zentrik-Schnellverschluss	•
Kondylenkugeln	Polymer
Bennett-Winkel verstellbar	0° bis 20°
Kondylenbahnneigung fest	35°
Frontzahnführungsteller 0° (montiert)	•
Adesso Multisplit Junior Magnetplattensystem	•
Frontzahnführungsstift verstellbar	± 6 mm
Frontzahnführungsstift mikroverstellbar	•
45° - Tischabstützung integriert	•

### Zubehör im Lieferumfang:

- > Frontzahnführungsteller: 30°
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Adesso Split®
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Splitex\*
- > Transportkoffer XP

### Arto XP2 >>> #12702

#### Das Grundmodell aus der neuen Arto XP-Artikulatorserie:

- > Angenehmes Handling durch ergonomische Konstruktion
- > Stabile und langlebige Vollaluminium-Bauweise
- > Drei kippsichere Arbeitspositionen möglich
- > Praktische Zentrik-Schnellverschlüsse
- > Mikroverstellbarer Führungsstift
- > Reichhaltiges Zubehör
- > Artex\*-kompatibel

#### Geeignet für die Montage von folgenden Magnetplattensystemen:

- > Adesso Split Set - Artex\* - Arto #10000
- > Adesso Multisplit Set - Artex\* - Arto #10200
- > Splitex-kompatibles Magnetplattenset - Artex\* - Arto #10010
- > Quicksplit Set - Artex\* - Arto #23000

## ARTO XP 2S ARTIKULATOR

Das ergonomische XP-Grundmodell, erweitert um eine praktische und extrem leicht bedienbare Immediate-Sideshift-Funktion, erfüllt auch gehobene technische Ansprüche.



Die Sideshift-Funktion lässt sich sehr einfach mit kleinen Hebeln an den Achsen aktivieren/deaktivieren.

Eine tolle Detaillösung der XP-Artikulatoren sind die verschleißarmen, selbstschmierenden Polymer-Kondylenkugeln.



### Arto XP 2s >>>

Katalognummer	#12702S
Bauweise	Non-Arcon
Artex*-kompatibel	•
Zentrik-Schnellverschluss	•
Kondylenkugeln	Polymer
Bennett-Winkel verstellbar	0° bis 20°
Kondylenbahnneigung fest	35°
Frontzahnführungsteller 0° (montiert)	•
Adesso Multisplit Junior Magnetplattensystem	•
Frontzahnführungsstift verstellbar	± 6 mm
Frontzahnführungsstift mikroverstellbar	•
45°-Tischabstützung integriert	•
ISS (Immediate Sideshift)	2 x 1,0 mm

### Zubehör im Lieferumfang:

- > Frontzahnführungsteller: 30°
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Adesso Split®
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Splitex\*
- > Transportkoffer XP

### Arto XP2S >>> #12702S

Das Grundmodell aus der neuen Arto XP-Artikulatorserie mit Immediate-Sideshift-Funktion (ISS):

- > Angenehmes Handling durch ergonomische Konstruktion
- > Stabile und langlebige Vollaluminium-Bauweise
- > Drei kippsichere Arbeitspositionen möglich
- > Praktische Zentrik-Schnellverschlüsse
- > Mikroverstellbarer Führungsstift
- > Reichhaltiges Zubehör
- > Artex\*-kompatibel

### Geeignet für die Montage von folgenden Magnetplattensystemen:

- > Adesso Split Set - Artex\* - Arto #10000
- > Adesso Multisplit Set - Artex\* - Arto #10200
- > Splitex-kompatibles Magnetplattenset - Artex\* - Arto #10010
- > Quicksplit Set - Artex\* - Arto #23000

## ARTO XP 3 ARTIKULATOR

Der vielseitige, teiljustierbare Prothetikartikulator der neuen XP-Serie, wie alle Modelle bereits ab Werk mit einem mikroverstellbaren Frontzahnführungsstift ausgestattet.



Arto XP 3 >>>	
Katalognummer	#12703
Bauweise	Non-Arcon
Artex*-kompatibel	•
Zentrik-Schnellverschluss	•
Kondylenkugeln	Polymer
Bennett-Winkel verstellbar	0° bis 20°
Kondylenbahnneigung verstellbar	-15° bis +60°
Frontzahnführungsteller 0° (montiert)	•
Adesso Multisplit Junior Magnetplattensystem	•
Frontzahnführungsstift verstellbar	± 6 mm
Frontzahnführungsstift mikroverstellbar	•
Arbiträrstifte	•
45°-Tischabstützung integriert	•

### Zubehör im Lieferumfang:

- > Frontzahnführungsteller: 30°
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Adesso Split®
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Splitex\*
- > Transportkoffer XP

### Arto XP3 >>> #12703

Das teiljustierbare Modell aus der neuen Arto XP-Artikulatorserie:


- > Angenehmes Handling durch ergonomische Konstruktion
- > Stabile und langlebige Vollaluminium-Bauweise
- > Drei kippsichere Arbeitspositionen möglich
- > Praktische Zentrik-Schnellverschlüsse
- > Mikroverstellbarer Führungsstift
- > Reichhaltiges Zubehör
- > Artex\*-kompatibel

Geeignet für die Montage von folgenden Magnetplattensystemen:

- > Adesso Split Set - Artex\* - Arto #10000
- > Adesso Multisplit Set - Artex\* - Arto #10200
- > Splitex-kompatibles Magnetplattenset - Artex\* - Arto #10010
- > Quicksplit Set - Artex\* - Arto #23000

## ARTO XP 3S ARTIKULATOR

Der vielseitige, teiljustierbare  
XP-Prothetikartikulator mit  
Immediate-Sideshift-Funktion.

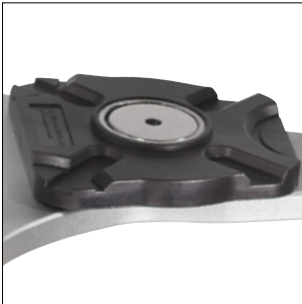

Das vormontierte Adesso Multisplit Junior Magnetplattensystem ermöglicht bei allen XP-Modellen einen direkten Start „out of the box“.

Adesso Multisplit Junior ist nicht zur Gleichschaltung geeignet, ermöglicht Ihnen aber die Nutzung der überragenden Splitcast-Eigenschaften des Systems.

Magnetplattensysteme zur Gleichschaltung sind im Nachkauf erhältlich.



Arto XP 3s >>>	
Katalognummer	#12703S
Bauweise	Non-Arcon
Artex*-kompatibel	•
Zentrik-Schnellverschluss	•
Kondylenkugeln	Polymer
Bennett-Winkel verstellbar	0° bis 20°
Kondylenbahnneigung verstellbar	-15° bis +60°
Frontzahnführungsteller 0° (montiert)	•
Adesso Multisplit Junior Magnetplattensystem	•
Frontzahnführungsstift verstellbar	± 6 mm
Frontzahnführungsstift mikroverstellbar	•
Arbiträrstifte	•
45°-Tischabstützung integriert	•
ISS (Immediate Sideshift)	2 x 1,0 mm

### Zubehör im Lieferumfang:

- > Frontzahnführungsteller: 30°
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Adesso Split®
- > 2 St. Montageplatten Connect® für Splitex\*
- > Transportkoffer XP

### Arto XP3S >>> #12703S

Das teiljustierbare Modell aus der neuen Arto XP-Artikulatorserie mit Immediate-Sideshift-Funktion (ISS):

- > Angenehmes Handling durch ergonomische Konstruktion
- > Stabile und langlebige Vollaluminium-Bauweise
- > Drei kippsichere Arbeitspositionen möglich
- > Praktische Zentrik-Schnellverschlüsse
- > Mikroverstellbarer Führungsstift
- > Reichhaltiges Zubehör
- > Artex\*-kompatibel

Geeignet für die Montage von folgenden Magnetplattensystemen:

- > Adesso Split Set - Artex\* - Arto #10000
- > Adesso Multisplit Set - Artex\* - Arto #10200
- > Splitex-kompatibles Magnetplattenset - Artex\* - Arto #10010
- > Quicksplit Set - Artex\* - Arto #23000

## ARTO XP // INDIVIDUALISIEREN PERSONALISIEREN // LIEFERUMFANG

**Pimp your XP >>>** Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und individualisieren Sie Ihre Arto XP-Artikulatoren: Tauschen Sie die vormontierten gegen Ihre Wunsch-Griffschalen aus! Wir bieten Ihnen eine Auswahl verschiedener Dekore an >>> Fragen Sie uns einfach!

Die Dekore sind extrem widerstandsfähig, unsere Tests mit verschiedenen Monomeren haben sie schadlos überstanden. Leider können wir nicht garantieren, dass sie allen im Dentallabor verwendeten Chemikalien widerstehen.



**Ihr ganz persönlicher Artikulator >>>**  
Die Typenschilder der XP-Artikulatoren sind austauschbar. Gerne liefern wir Ihnen laserbeschriftete Schilder, gestaltet nach Ihren Wünschen, zum Beispiel mit Ihrem Firmenlogo >>> Fragen Sie uns!



### Lieferumfang Arto XP >>>

Jeder Arto XP wird mit je zwei Montageplatten für Adesso Split und Splitex\* ausgeliefert. Außerdem befindet sich ein 30°-Frontzahnführungsteller im Lieferumfang. Die Artikulatoren werden in einem robusten Kunststoffkoffer angeliefert. Bereits vorinstalliert ist eine Schraubversion des Adesso Multisplit Junior Magnetplattensystems sowie ein mikroverstellbarer Frontzahnführungsstift.

**Baumann Dental GmbH**  
Keltern - Germany  
Fon +49 (0) 7236 - 933 69 0  
[www.baumann-dental.de](http://www.baumann-dental.de)

\*Artex & \*Splitex sind eingetragene Marken der Amann Girschbach GmbH, D-75177 Pforzheim  
\*Quicksplit ist eine eingetragene Marke der Hans Roßner & Sohn GmbH, D-87700 Memmingen